

SURBLOUSE ANTISALISSURE LAVABLE ET REUTILISABLE

SURBLOUSE-MSB001


Réutilisable, cette surblouse est conçue pour être lavable industriellement 50 fois en conservant sa capacité de protection.

SURBLOUSE ANTISALISSURE

SURBLOUSE INDIVIDUELLE À **USAGE DES PROFESSIONNELS EN MILIEU HOSPITALIER**

(Suivant la note d'information interministérielle du 8 avril 2020)

Cette surblouse est réalisée en **taille unique**. Elle s'adapte à toutes les morphologies grâce à son système de **fermeture arrière réglable à l'encolure** et à la **ceinture** fixée au niveau de la taille. L'ouverture est sur le dos pour faciliter l'enfilage et le déshabillage. Les poignets sont munis d'un **resserrage** (bord côte) afin de permettre le port de gants de protection et si nécessaire d'une manchette de protection.

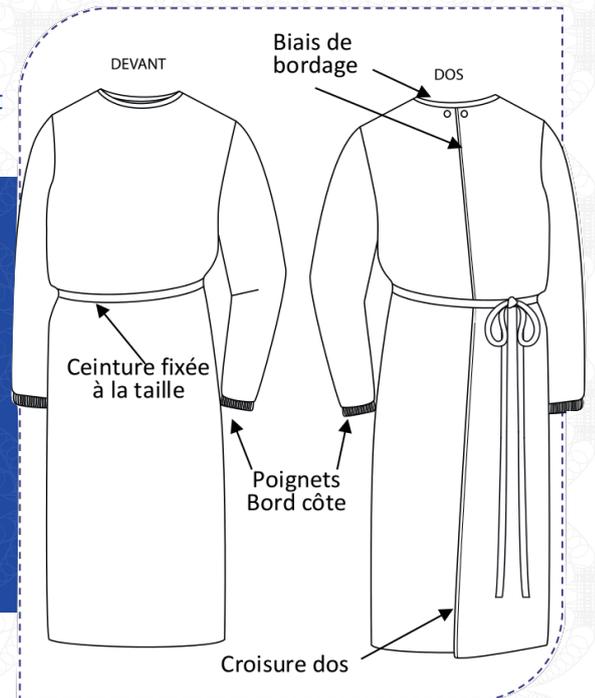

● Surblouse antisalissure

Référence : SURBLOUSE-MSB001

Marque : AROMADUNES

Fabricant : AROMADUNES

Taille : Unique

Composition : 65% PES 35% COTON

Préconisations d'entretien :



Assurez-vous de laver une première fois la surblouse avant la toute première utilisation.

Lavage industriel à 60°C

Chlorage interdit

Repassage autorisé à 110°C

Séchage en tambour ou en tunnel

Nettoyage à sec autorisé

● Pour se protéger et protéger les autres



Se laver régulièrement les mains



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter



Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades



Garantie de la **non-toxicité** des textiles selon le standard **Oekotex 100**



pharma@aromadunes.com

AROMADUNES, P.A des Vallées, D2020 - 45770 Saran
RCS Orléans 811 896 620 | S.A.R.L au capital de 17000€



Informations pratiques

Référence :

SURBLOUSE-MSB001

Conditionnement :





SURBLOUSE ANTISALISSURE LAVABLE ET REUTILISABLE

SURBLOUSE-MSB001

NOTICE D'UTILISATION

Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Surblouse antisalissure suivant la note d'information interministérielle du 8 Avril 2020.

- Nom et coordonnées du fabricant
- Référence du produit

AROMADUNES S.A.R.L
P.A des Vallées, D2020 - 45770 Saran
pharma@aromadunes.com

SURBLOUSE-MSB001

PRECONISATIONS D'EMPLOI ET D'UTILISATION

Domaine d'utilisation	<p>Cette surblouse est destinée au personnel soignant et est utilisée en milieu hospitalier. Elle est portée par-dessus la tenue du personnel et sous les EPI de type tablier, manchettes. Elle est destinée à protéger la tenue du personnel soignant contre les salissures.</p> <p>Elle ne nécessite aucun test ni procédure de validation.</p> <p>Il est recommandé de fournir plusieurs surblouses par personne compte tenu de la rotation liée à l'entretien.</p>
Recommandations de manipulations des surblouses	<ul style="list-style-type: none">• Laver la surblouse avant la première utilisation• Avant de mettre la surblouse, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;• Mettre la surblouse par-dessus ses vêtements de travail, l'enfiler par les manches puis fermer à l'arrière-grâce aux pressions. Ajuster la surblouse à sa taille avec la ceinture.• Chaque fois que l'on touche une surblouse usagée, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;• Pour retirer la surblouse : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant de la surblouse) ; la déposer immédiatement dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
Entretien de la surblouse	<p>Après utilisation, la surblouse doit être isolée pour être lavée. Il est recommandé de la placer dans un sac réutilisable à laver. Le sac et la surblouse peuvent être lavé ensemble et dans ce cas sortir la surblouse du sac.</p>
Explication sur la méthode de lavage	<p>Lavage industriel à 60°C. Séchage de finition en tunnel. Cette surblouse a été conçue pour être réutilisée et lavée 50 fois.</p>
Composition de la matière principale	<p>65% PES 35% COTON</p>
Stockage	<p>Les surblouses non utilisées sont à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.</p>
Contexte d'utilisation	<p>Cette surblouse est strictement adaptée à la crise sanitaire liée au COVID 19.</p>

pharma@aromadunes.com

AROMADUNES, P.A des Vallées, D2020 - 45770 Saran
RCS Orléans 811 896 620 | S.A.R.L au capital de 17000€



Informations pratiques

Référence :
SURBLOUSE-MSB001

Conditionnement :



3 770005 885410